



EasySense S9 sensori paigaldamine www.linusmedical.ee www.veresuhkur.ee www.cgm.ee



Vajalikud tarvikud:

- Mobiilirakendus EasySense
- Transmitter ehk saatja
- S9 sensor
- Salvrätid naha puhastamiseks (desifintseerivad)









EasySense rakendus

1. Lae alla "Medtrum Easysense mmol/L" rakendus



Androidi

telefonile







Medtrum Medica	rum EasySense	mmol/L
****1	Medtrum	🖓 Medical
 and and	for a second sec	
Learn mo	ore about search	n results.

Rakenduse vaade

Apple Store's

	Log in		-
Q Email			
Password			-
	Log in		
Register		Forgot pass	woi
sounds an cc Don't A	sounds and icon badges. These configured in Settings.		

ja registreeru

2. Loo konto e-posti aadressiga (vajuta *Register*), kuhu saad ka kinnituskoodi.

3. Luba kõik ligipääsud (bluetooth ja notifications).

www.linusmedical.ee

3



Valige rakenduses S9 sensor

4. Peale sisse logimist ava menüüst Settings -> CGM System -> CGM type -> vali **S9**

5. Vali Add Transmitter

6. Registreeri saatja QR koodi abil. Kood asub karbi taga.

7. Vali lugemiseks suurem QR kood karbi tagaküljelt või sisesta seerianumber (SN) käsitsi. Vt ka järgmist slaidi.

10:26 🛃 🗹 🕹	😰 🔌 💯 .il 💯 .il 96% 🛢	10:23 🗹 🕹	10:23 🗹 🕹 🛛 🛱 💥 🛱 🖓 al 🖓 al 97%		10:29 🖻 🖬 💰
← CGM System		≡ Monitor		÷	← QR Code
CGM Status		CG			Align QR (frame to s
CGM Туре	\$9 >				
Add Transmitter					
Glucose Alerts	())	Enable the fo	ollowing permissions:		L
Factory Calibration	•	Bluetooth permiss use EasySense to product, please to Bluetooth permiss	sion: In order for you to connect to the Medtrum ab Allow to enable your sion		
Sensor Life(days)	7 14	Nearby Device pe connect the Medi through Bluetooth permission to turn please tap OK an Allow	ermission: In order to crum product normally n, we need your n on the Nearby Device, d select Allow or Always		
		Acknowle	edged and turn on.		Ente
		Ade	3 Transmitter		Add tro avab kaa lisa karbi
(> <	111	0 <		K

ansmitter meravaate. kaanelt OR ood

Androidi vaade

Luba kõik seaded



Saatja ehk transmitteri lisamine



NB! Ära kasuta pakendil olevat väiksemat QR koodi.

Käsitsi lisamiseks sisesta SN kood.

Add transmitter avab kaameravaate, lisa karbi kaanelt QR kood.



Kehale kinnitamine

8. Vali asukoht ja puhasta nahapiirkond.

9. Eemalda turvalukk ja kleepsud ning aseta paigaldaja nahale, surudes seda kindlalt vastu nahka.





Eemalda turvalukk ja paigaldaja kleepsud



Sensori paigaldamine

10. Vajuta paigaldajal paigaldamise nuppu.

11. Eemalda paigaldaja.







Saatja lukustamine

12. Aseta saatja sensorile ja kontrolli, et saatja on korralikult sensoriga ühendatud (peab käima tugev **klõps** ja sensor ning saatja on pealt tasapinnalised). Align the transmitter and sensor support mount

13. Jälgi, et roheline tuluke vilgub 3 ja 6 korda (1 min jooksul).





Make sure the transmitter is securely connected



Sensori start

14. Peale saatja vilkumist tuleb rakenduses minna: menüü -> CGM -> Start sensor

15. Sisesta sensori kood lugedes QR koodi telefoni kaameraga või lisa kood käsitsi.





Head kasutamist!

16. Peale sensori koodi sisestamist tuleb rakendusse teade *Warmup* (mis võtab 30 minutit).

Kui tekib küsimusi, siis vaata uuesti punkte alates 12.

Vajadusel võta ühendust klienditeenindusega Linus Medicalis 800 7070 või <u>diabeet@linusmedical.com</u>

Vastame teie küsimustele tööpäeviti. Muul ajal võite abi küsida S9 virtuaalselt assistendilt: <u>https://www.linusmedical.ee/medtrum-s9-assistent/</u>

www.linusmedical.ee www.veresuhkur.ee www.cgm.ee

