


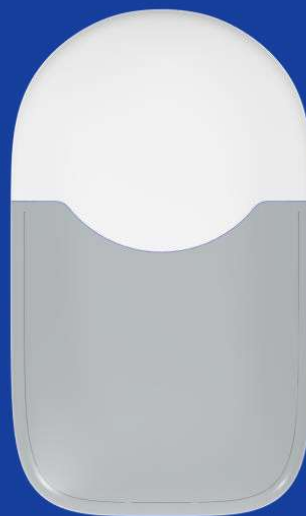


Linus
Medical

Установка EasySense S9


www.cgm.ee

www.linusmedical.ee

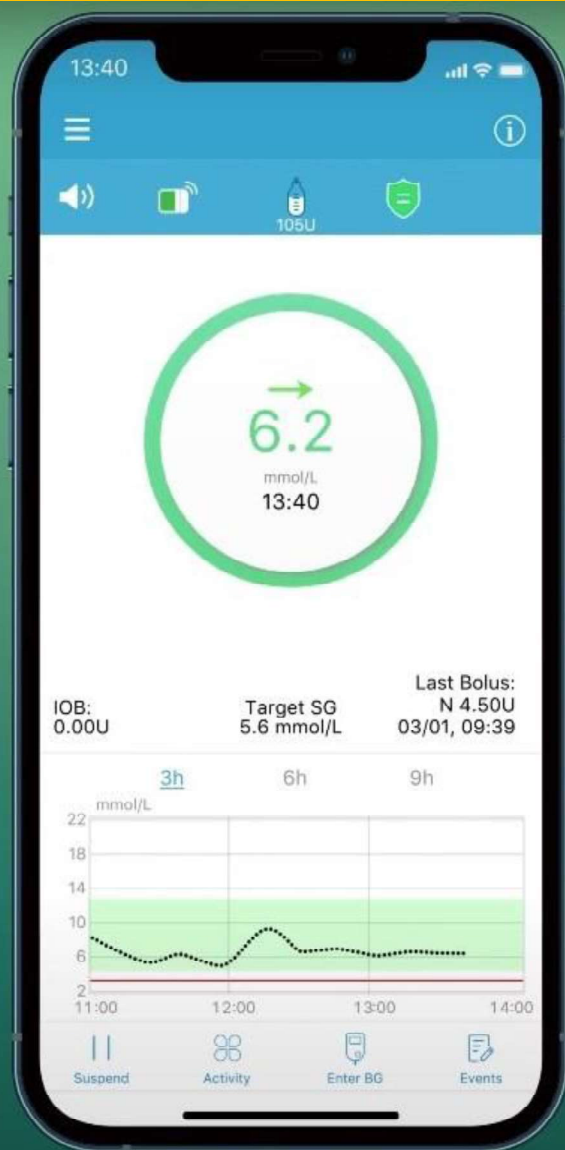

Необходимые аксессуары:

- Мобильное приложение **EasySense**
- Передатчик **S9**
- Сенсор **S9**
- Салфетки для очистки (дезинфекции) кожи

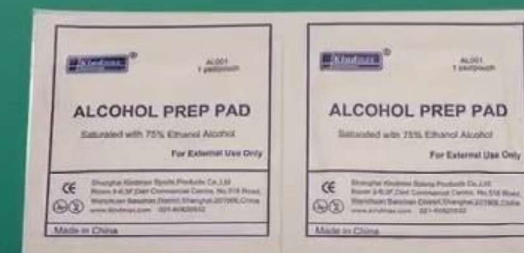



Приложение EasySense


1. Загрузите приложение «Medtrum Easysense mmol/L»




[Android](#)



[Apple](#)

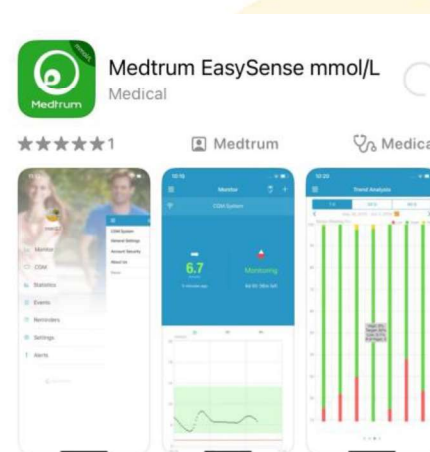

[Learn more](#) about search results.

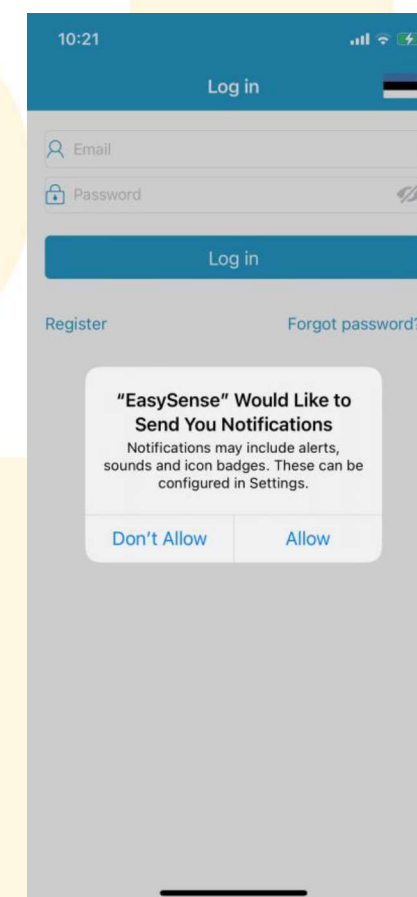

2. Создайте учетную запись, указав адрес электронной почты (нажмите кнопку Зарегистрироваться), на который вы также получите проверочный код.




3. Включите все доступы (bluetooth и уведомления).

www.linusmedical.ee



Приложение EasySense


1. После входа в систему перейдите в Настройки -> Система CGM -> Тип CGM -> выберите S9.
2. Выберите Добавить передатчик
3. Зарегистрируйте передатчик с помощью QR-кода. Код находится на задней стороне коробки или введите серийный номер (SN) вручную.

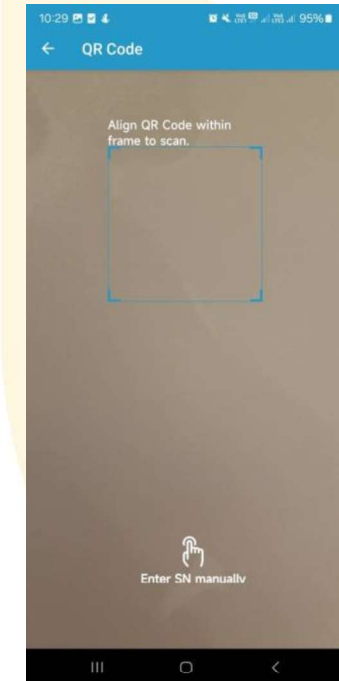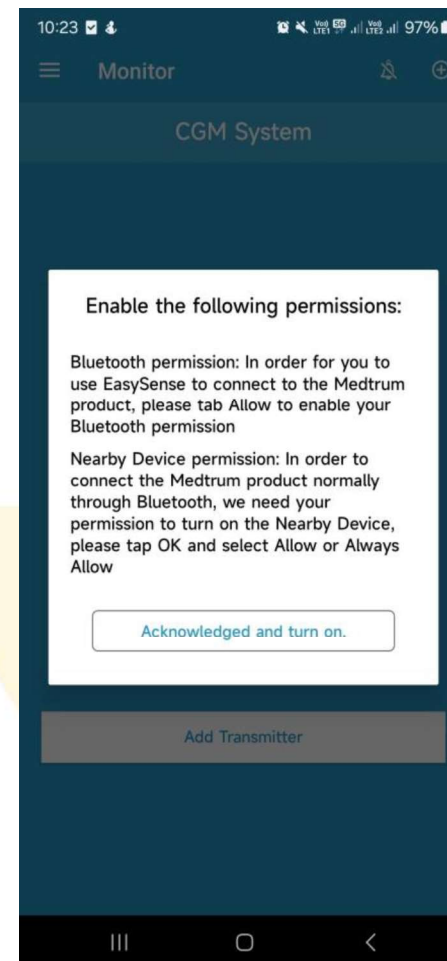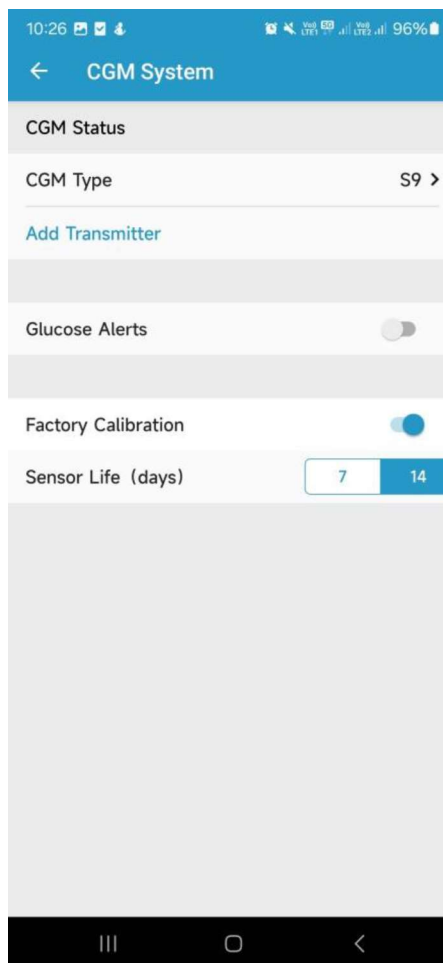

Добавьте передатчик с помощью считывателя QR-кода или вручную



Передатчик S9 (Transmitter)

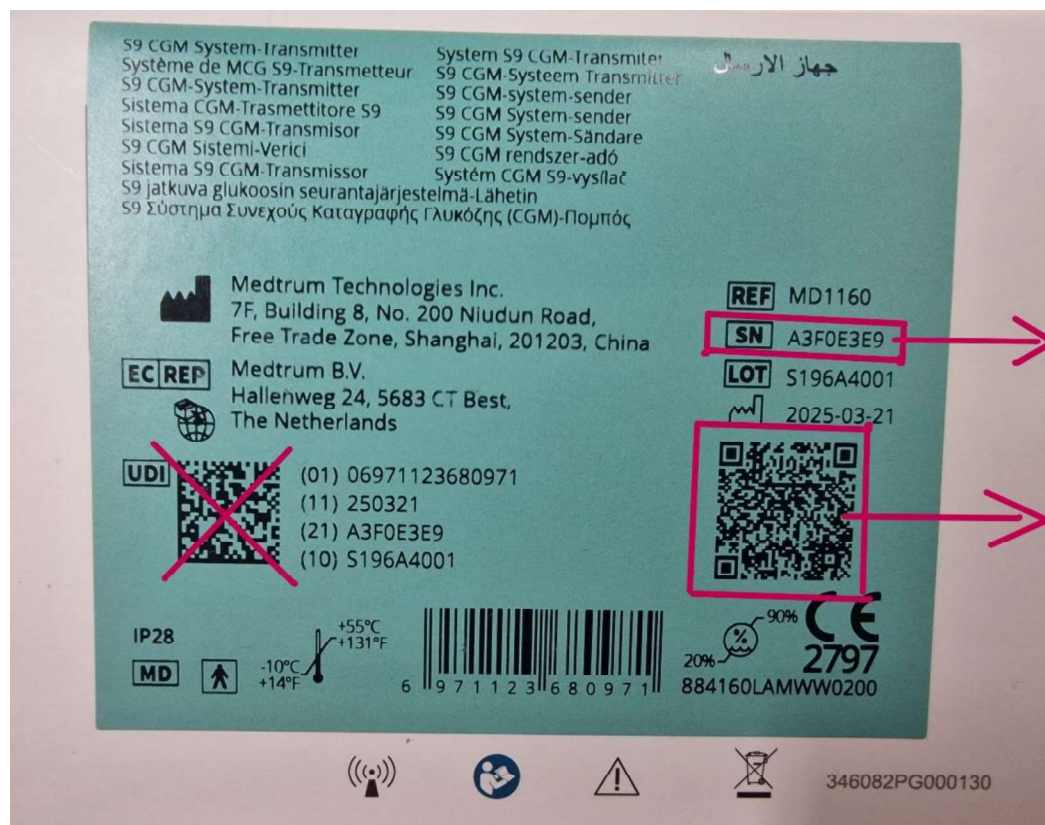



Серийный номер передатчика

QR-код с серийным номером

Установка сенсора

4. Выберите место и очистите участок кожи.

5. снимите предохранительный замок и защитные полоски и поместите аппликатор на кожу, плотно прижмите.

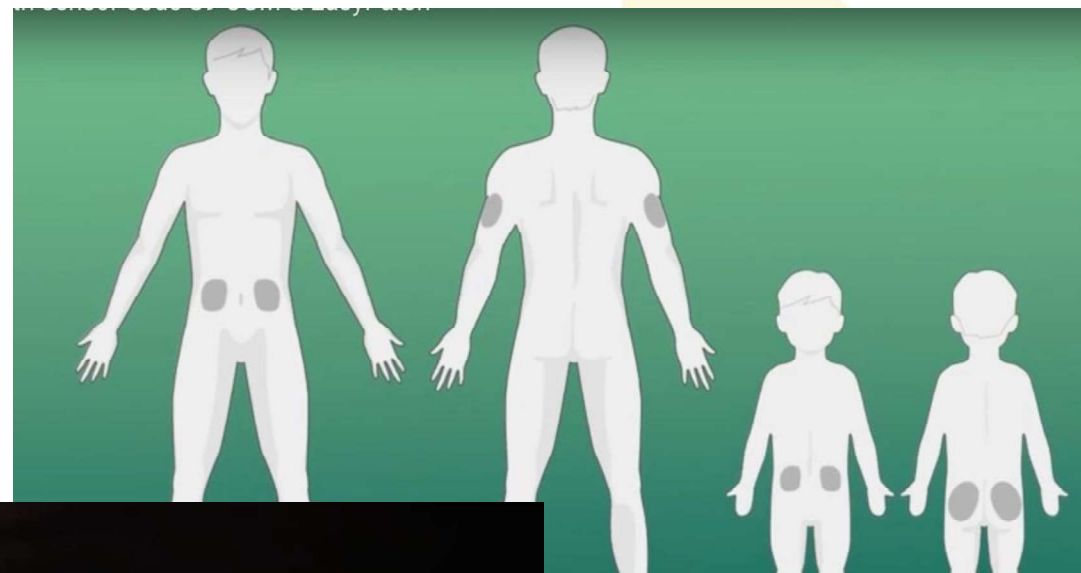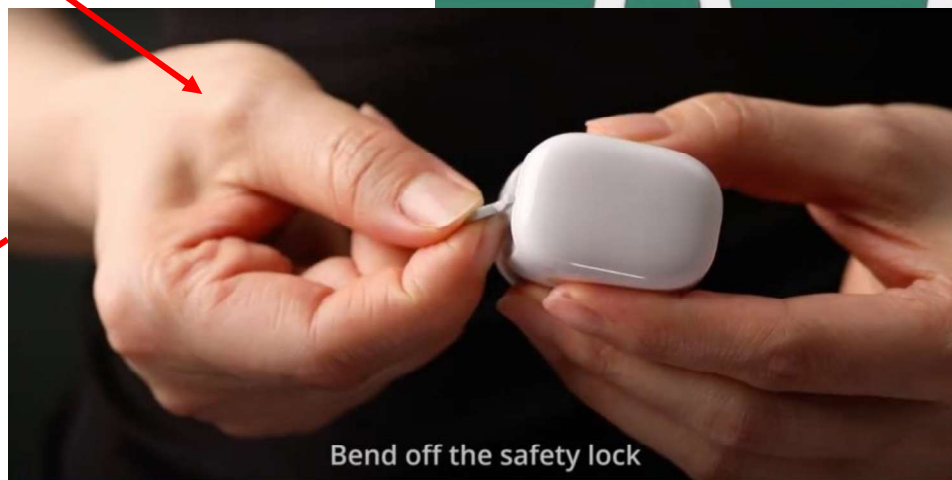


Eemalda turvalukk ja paigaldaja kleepsud

Установка сенсора


10. Нажмите кнопку до щелчка.

11. Удалите аппликатор.

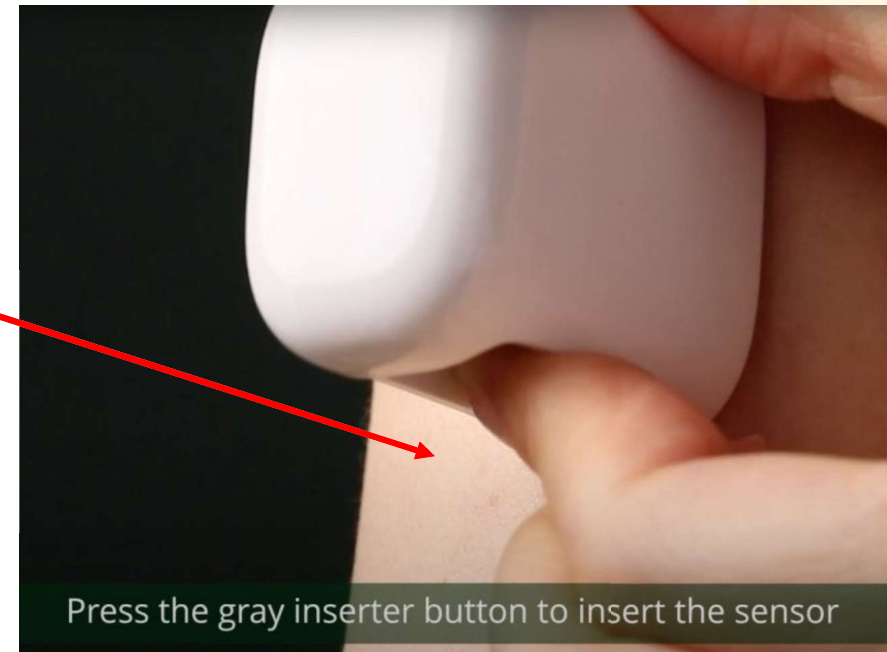

Установка передатчика

12. Поместите передатчик на сенсор и убедитесь, что он правильно подключен (должен раздаться щелчок, а передатчик и сенсор должны быть на одном уровне).
13. Убедитесь, что зеленый индикатор мигает. 3, а затем 6 раз (в течение 1 мин.)


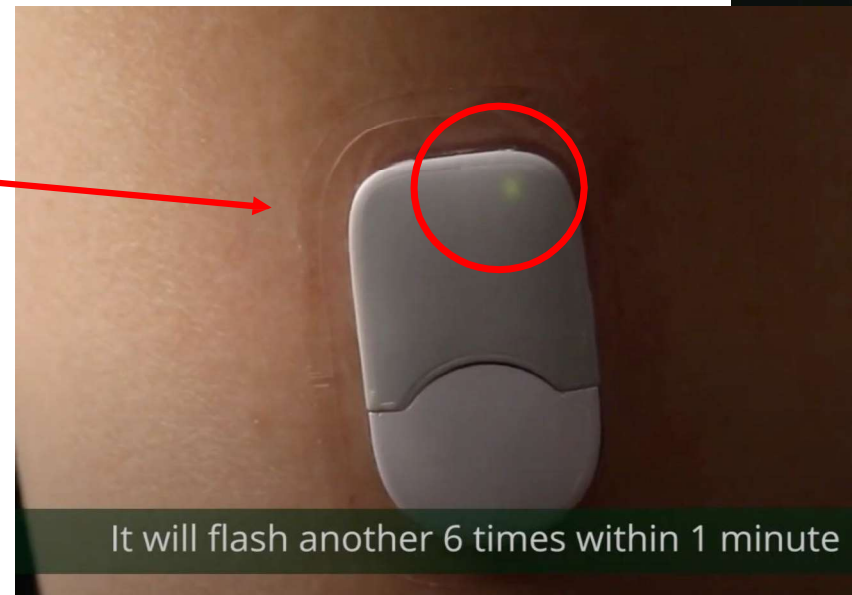




Запуск сенсора

14. После того как передатчик замигает, в приложении перейдите в меню -> CGM -> Start sensor

15. Введите код сенсора, считав QR-код с помощью камеры телефона, или добавьте код вручную.

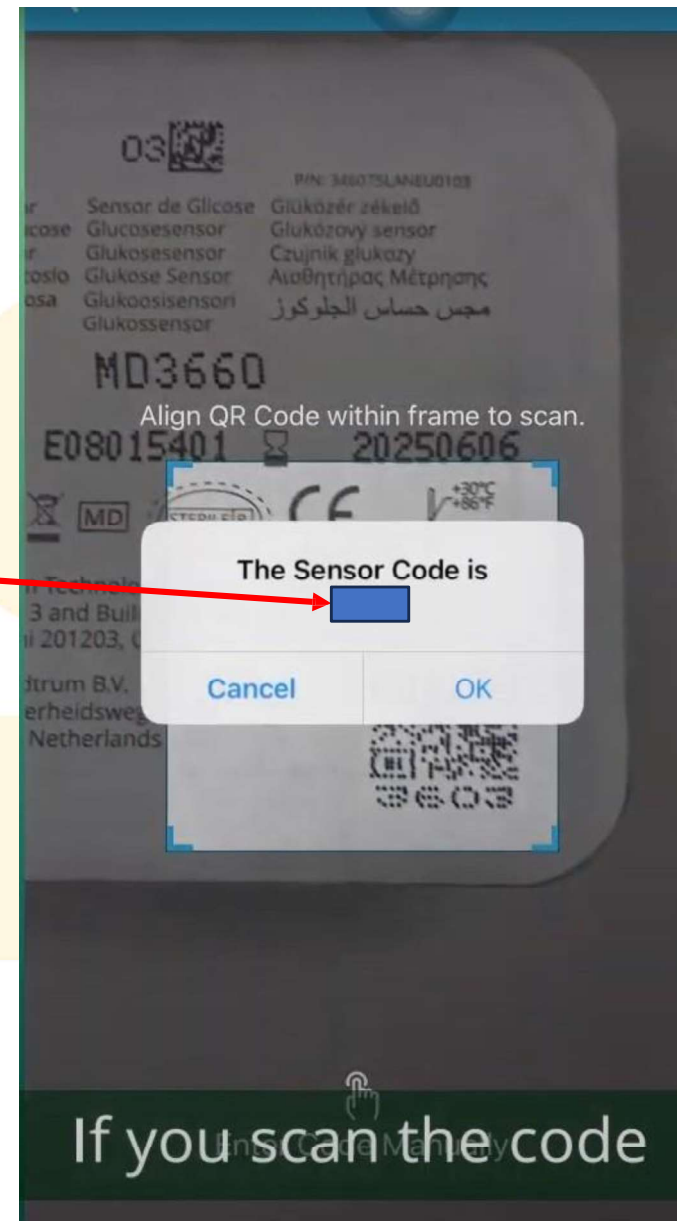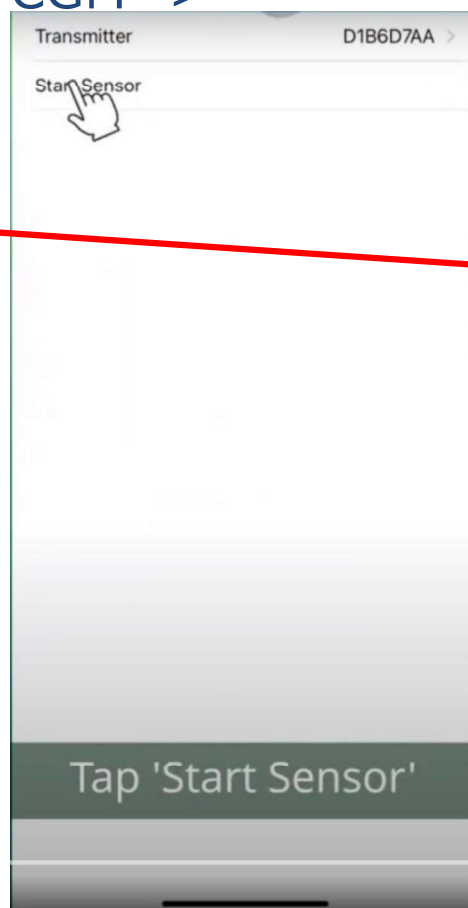



Прогрев сенсора

16. После ввода кода датчика в приложении появится сообщение о прогреве (который займет 30 минут).

www.cgm.ee
www.linusmedical.ee

